

智能医美 APP 指导书

安装说明

第一步：收到产品（智能主机）+（眼膜）。

第二步：首次使用进行对智能主机充电，充电的时候采用触点数据线；充电时亮红色指示灯，充满电亮蓝色指示灯(注意在充电过程中不能使用)。

第三步：当充满电亮蓝色指示灯之后，手机扫描下载智能医美 APP“二维码 APP”（微信扫一扫、QQ 扫一扫、浏览器扫一扫）。



智能医美 APP 下载

第四步：如果是安卓手机，点击 **Android** 下载；再点击手机右上方三个小点；弹出对话框，通过浏览器下载；点击下载并安装。



第五步：如果是苹果手机，直接在 APPstore 搜索“智能医美” APP 下载完成。

第六步：APP 装上之后手机屏幕显示“智能医美”。

- 1.主机有电并开机(蓝色灯一闪一闪)，第一次使用建议充电。
- 2.手机蓝牙要打开。
- 3.开启智能医美 APP，

A.点击“添加设备”如图 1；

B.选择“添加智能面膜、智能胸膜、智能腹膜、智能眼膜<是什么产品添加点击对应的名称>”如图 2；

C.点击搜索如图 3

D.点击连接如图 4.；进入图 5，享受 12 分钟之旅。



图 1



图 2

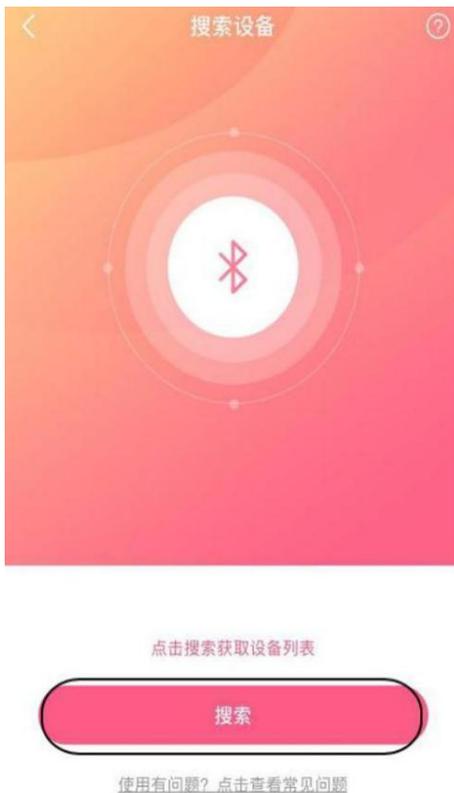


图 3



图 4



图 5

图 6

图 7

E.图 5 模式选择,其中智能模式为其他三种模式的混合,每次使用 12 分钟

F.图 6、图 7 为 12 分钟测试完毕的趋势图指标(仅供参考)；

常见问题：

1、蓝牙连接不上

(1) 当手机下载 APP 之后,开启 APP，会弹出对话框，选择“始终允许”；启动蓝牙，如果没有点击允许，选择通过手机设置打开蓝牙。

(2) 第一次使用请阅读说明书，进行对主机进行充电，充电的时候红色灯亮，充满蓝色灯亮，预计充电 2 个小时；注意充电采用 5V/1.5A 以下充电头。

(3) 开启主机，蓝色灯光会闪烁，开启的 APP 自动连接点击连接，连接成功 APP 有显示(手机 APP 上面有 MAC 数字),如果连接不成功。

①首先检测主机是否开机（是否有蓝色灯光闪烁）

②确认主机是否有电量

③手机蓝牙是否打开

④APP 是否打开

⑤切换手机尝试

(4) 如有主机使用过程中，暂停到某个时间，是因为如下原因，
请按照如下方式处理：

①请关闭主机并关闭 APP

②同时确认是否有两只手机同时打开了 APP,建议逐一连接。

启动 APP，开启主机。

③连接好之后启动使用。

2、脉冲波

(1) 主机与 APP 连接之后，与眼膜纸两个触点两两吸附；进行档位调整，享受 12 分钟智能眼膜之旅。注意档位从小到大调整（1-16 档位）。

(2) 脉冲波大小依据自身感受调整档位。

3、数据显示

(1) 智能主机结合眼膜一起完成美好体验。

(2) 12 分钟结束会有一份智能眼膜趋势图报告。

4、主机保养

(1) 确保使用完毕进行对触点擦拭干净。

(2) 主机使用中，不能掉在地上(尤其是水泥地、瓷砖)。